




PARA TODAS LAS HERIDAS CON EXUDADO MODERADO-BAJO CON PIEL PERILESIONAL DELICADA

UrgoTul
Lite



Micro-adherente

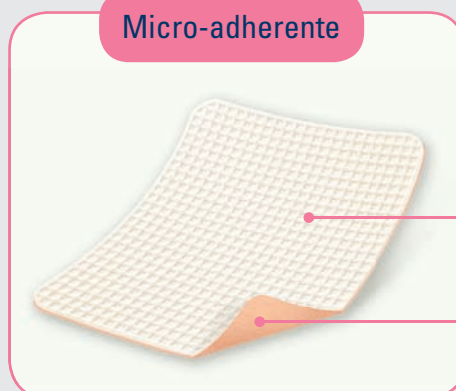

Masa con TLC (Tecnología Lípido Coloidal)

Fina espuma absorbente

MODO DE ACCIÓN

En presencia de exudado, la masa microadherente forma un gel lípido-coloidal en contacto con la herida; esto facilita:

1. Crear un ambiente húmedo que favorece la cicatrización.
2. Retirar el apósito de manera totalmente atraumática sin afectar al tejido neoformado.
3. Respetar la piel perilesional.

La espuma de poliuretano absorbente y el soporte semi-permeable aseguran un alto drenaje de exudado, protegiendo la piel perilesional contra la maceración.



Herida crónica con exudado bajo y piel perilesional delicada



Herida aguda con exudado bajo y piel perilesional delicada

PROTOCOLO DE UTILIZACIÓN DE URGOTUL® LITE

1. Limpiar la herida con suero fisiológico.
2. Aplicar **Urgotul® Lite** directamente sobre la herida.
3. Aplicar un vendaje de fijación.
4. Renovar el apósito cada 2-4 días en función del grado de exudado y de la evolución de la herida.



TAMAÑOS	U/C	C.N.
6,5 x 10 cm	16	164455.8
13 x 12 cm	16	164454.1

www.urgomedical.es Twitter: @UrgoMedical_es

URGO
MEDICAL



PARA TODAS LAS HERIDAS CON EXUDADO
MODERADO-BAJO CON PIEL PERILESIONAL SANA

UrgoTul
— Lite Border



Trama con TLC (Tecnología Lípido Coloidal)

Compresa fina absorbente

Soporte adhesivo de alta tolerancia

►◀ MODO DE ACCIÓN

En presencia de exudado, la trama microadherente forma un gel lípido-coloidal en contacto con la herida; esto facilita:

1. Crear un ambiente húmedo que favorece la cicatrización.
2. Retirar el apósito de manera totalmente atraumática sin afectar al tejido neoformado.
3. Respetar la piel perilesional, debido al adhesivo de alta tolerancia.

La compresa central absorbente y el soporte semipermeable aseguran un alto drenaje de exudado, protegiendo la piel perilesional contra la maceración.



Herida crónica con exudado bajo y piel perilesional sana



Herida aguda con exudado bajo y piel perilesional sana

►◀ PROTOCOLO DE UTILIZACIÓN DE URGOTUL® LITE BORDER

1. Limpiar la herida con suero fisiológico.
2. Aplicar **Urgotul® Lite Border** directamente sobre la herida.
3. Renovar el apósito cada 2-4 días en función del grado de exudado y de la evolución de la herida.



TAMAÑOS	U/C	C.N.
10 x 10 cm	16	164451.0

www.urgomedical.es Twitter: @UrgoMedical_es

