

ALLEVYN Ag ADHESIVE, apósito hidrocelular adhesivo con plata.



Características

- **Propiedades anti-microbianas**, efectivo contra un amplio espectro de microorganismos patógenos presentes en la lesión.
- **Liberación sostenida de plata en el lecho de la lesión.**
- **No se adhiere al lecho de la lesión.**
- **Elevada capacidad de absorción gracias a su capa central hidrocelular.**
- **Promueve la cicatrización de la lesión.**
- **Comformable**, fácilmente adaptable a cualquier zona del cuerpo.
- **Minimiza el riesgo de maceración de la piel.**
- **Suave y acolchado**, gran confort para el paciente.
- **Adhesivo de alta tolerancia cutánea.**
- **Mínimos cambios de apósito**, puede permanecer en la lesión hasta 7 días.
- **Fácil de usar y retirar.**

Descripción

ALLEVYN Ag Adhesive es un apósito antimicrobiano absorbente trilaminar que consiste en una capa central hidrocelular absorbente que contiene sulfadiazina argéntica, situada entre una capa adhesiva de poliuretano microperforada de contacto con la lesión y una película de poliuretano externa impermeable. El apósito proporciona una barrera eficaz contra la contaminación microbiana, protegiendo la lesión contra microorganismos patógenos invasivos, ayudando de esta manera a una curación más rápida. La sulfadiazina argéntica es efectiva contra los microorganismos presentes en el apósito y en la lesión. En presencia de exudado el apósito ayuda a mantener un ambiente húmedo en la herida.

Indicaciones

ALLEVYN Ag Adhesive es un apósito antimicrobiano absorbente para la cicatrización por segunda intención de lesiones exudativas crónicas y agudas, de espesor total y parcial o superficiales con tejido de granulación, tales como: úlceras por presión, úlceras venosas, úlceras diabéticas, quemaduras, zonas donantes, úlceras fungosas/malignas y lesiones quirúrgicas dehiscentes. ALLEVYN Ag Adhesive puede utilizarse en lesiones infectadas. Cuando el producto se utilice en lesiones infectadas, éstas deben tratarse según el protocolo clínico local.

Instrucciones de uso

1. Limpiar la lesión según los procedimientos normales.
2. Seleccionar el apósito un poco más grande que la lesión.
3. Preparar y limpiar la piel perilesional secando cualquier exceso de humedad. Para asegurarse el contacto con la úlcera, deberá recortarse el exceso de vello alrededor de la misma, si fuera necesario.
4. Sacar el apósito de su envase original mediante una técnica aséptica
5. Retirar el papel protector del apósito ALLEVYN Ag Adhesive
6. Colocar el apósito alisándolo encima de la lesión y retirar el papel protector restante.
7. ALLEVYN Ag Adhesive puede cortarse, especialmente para la curación de heridas en rodillas, codos y otras zonas de difícil acceso
8. Cuando se aplica ALLEVYN Ag Sacrum, colocar la porción más estrecha a 2 cm, como mínimo, del esfínter anal. Posteriormente continuar con la aplicación del apósito en la zona.

Léase detenidamente las instrucciones de uso contenidas en el envase antes de su aplicación.

Contraindicaciones

No utilizar en pacientes con hipersensibilidad conocida a la sulfadiazina argéntica o a las sulfonamidas. Debido a que las sulfonamidas causan kernicterus, no utilizar ALLEVYN Ag Adhesive en mujeres en avanzado estado de gestación o en periodo de lactancia, en bebés prematuros o en recién nacidos durante los primeros meses de vida.

ALLEVYN Ag ADHESIVE, apósito hidrocelular adhesivo con plata.

Composición

Película exterior	Film de poliuretano
Capa central	Capa hidrocelular de poliuretano con sulfadiazina argéntica
Capa de contacto	Capa de poliuretano microperforada
Masa adhesiva	Acrílica








Especificaciones técnicas

Dimensiones	Nominal $\pm 0,5$ cm
Peso	500-700 g/m ²
Capacidad de absorción	Mínimo 30 g/100cm ²
Permeabilidad al vapor de agua	1000-4000 g/m ² 24 horas
Adhesividad al acero	Mínimo 1 N/cm










Tamaño apósito	Superficie activa capa hidrocelular
7,5 x 7,5 cm	5 x 5 cm (25,0 cm ²)
10 x 10 cm	7,5 x 7,5 cm (56,2 cm ²)
12,5 x 12,5 cm	10 x 10 cm (100,0 cm ²)
17,5 x 17,5 cm	15 x 15 cm (225,0 cm ²)
Sacrum 17 x 17 cm	123,5 cm ²
Sacrum 22 x 22 cm	232,1 cm ²

Presentación

Código Producto	Descripción	Unidades / Envase	Unidad mínima de venta	Código EAN
66800072	ALLEVYN Ag Adhesive 7,5 x 7,5 cm	10 apósitos/caja	1 caja	5000223461621
66800074	ALLEVYN Ag Adhesive 10 x 10 cm	10 apósitos/caja	1 caja	5000223461652
66800076	ALLEVYN Ag Adhesive 12,5 x 12,5 cm	10 apósitos/caja	1 caja	5000223461683
66800080	ALLEVYN Ag Adhesive 17,5 x 17,5 cm	10 apósitos/caja	1 caja	5000223461713
66800092	ALLEVYN Ag SACRUM, para el sacro 17 x 17 cm	10 apósitos/caja	1 caja	5000223461867
66800095	ALLEVYN Ag SACRUM para el sacro 22 x 22 cm	10 apósitos/caja	1 caja	5000223461898

Certificación	Composición	Esterilidad	Conservación	Fabricante
ON n° 0086 CE n° CE 00356 Clase CE III, estéril Smith & Nephew, S.A.U ISO 9001:2008 			 24 meses  Manténgase en lugar seco  No exponer el producto a la radiación solar	 Smith & Nephew Medical Limited Hull HU3 2BN England. Distribuidor Smith & Nephew, SAU  23°C  Representante autorizado

Leyenda símbolos

 No contiene látex	 Producto esterilizado por irradiación
 Caducidad	 No reutilizar
 Manténgase en lugar seco	 Temperatura de almacenamiento
 No exponer el producto a la radiación solar	
 Fabricante	 Representante autorizado

Curación de Heridas

Smith & Nephew, S.A.U
 Fructuós Gelabert, 2-4. 08970. Sant Joan Despí (Barcelona)
 Tel. Atención Cliente: 902 30 31 60 - Fax. Atención cliente: 902 30 31 70
 A-28123297