


Askina® Touch

Apósito hidrocélular multicapa estéril, No adhesivo

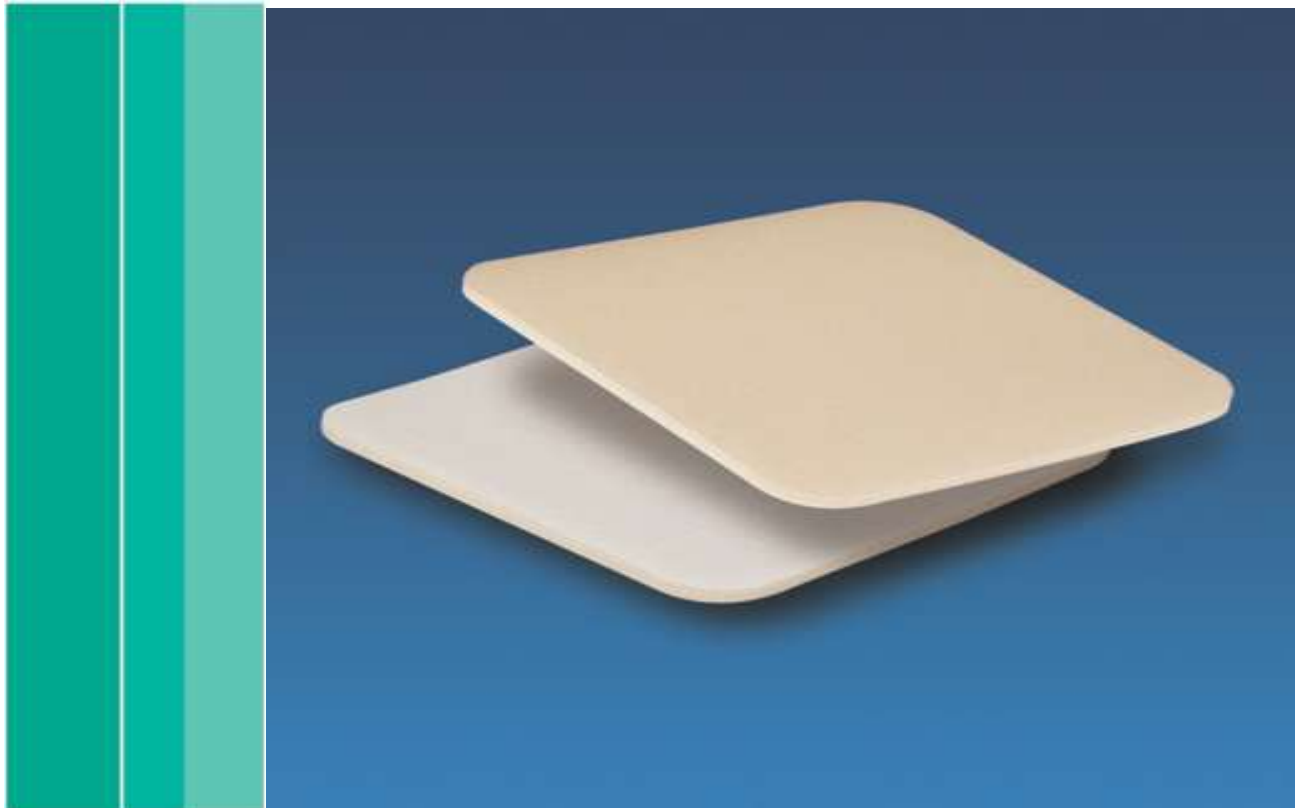

ASKINA® TOUCH®



Descripción del producto

Apósito de espuma de poliuretano (hidrocelular) multicapa,
No adhesivo y estéril.

Composición

- Capa de contacto de poliéster
- Fórmula de alta absorción en hidrogel
- Capa interfase
- Film de poliuretano reticulado
- Film externo recubrimiento en poliuretano

Indicaciones

Indicado en la cura húmeda y térmica, así como, en la profilaxis de las úlceras y lesiones crónicas de la piel.

Muy flexible y adaptable a las distintas anatomías del cuerpo.

Impermeable al agua y microorganismos pero permeable al vapor de agua e intercambios gaseosos. No deja residuos en su retirada al no desintegrarse.

Caracterizado por su estabilidad estructural y alta capacidad de absorción, retirando el exceso de exudado en contacto directo con el lecho ulceral y manteniéndolo en un compartimiento superior para evitar cualquier daño sobre la piel perilesional.

Compatible con todos los productos de cura en ambiente húmedo.

Puede permanecer hasta 7 días en su aplicación.

Instrucciones de Utilización

Askina® Touch es muy fácil de aplicar y no se precisan conocimientos ni equipos especiales.

Askina® Touch puede dejarse colocado durante varios días, dependiendo de la cantidad de exudado siempre y cuando no se produzcan fugas, en cuyo caso hay que realizar el cambio de apósito.

Preparación de la Piel:

Limpiar la lesión con una solución para limpieza y descontaminación (PHMB+Betaína) o solución salina en su defecto.

Secar la piel alrededor de la lesión.

Aplicación del Apósito:

Seleccionar el tamaño adecuado de **Askina® Touch** que cubra completamente la superficie de la lesión, asegurando un margen de 2 a 3 cm alrededor de los bordes de la lesión.

Si fuera preciso, **Askina® Touch** se puede recortar al tamaño necesario antes de retirar las capas de protección. Siempre que se requiera, es posible sobreponer varios apósitos a fin de cubrir las lesiones grandes.

Retirar las capas de protección. Colocar **Askina® Touch** sobre la lesión y apretar suavemente para garantizar la correcta aplicación.

Askina® Touch puede dejarse colocado durante varios días, máximo una semana, según el estado de la lesión.



Condiciones de conservación

Conservar en lugar fresco y seco

Caducidad: 3 años.

Presentaciones

Askina Touch 10x10 cm

C/ 3 unidades.

Cód. Nacional 495648

Askina Touch 10x15 cm

C/ 3 unidades.

Cód. Nacional 495655

Askina Touch 15x15 cm

C/ 3 unidades.

Cód. Nacional 495663

*Financiado por el SNS

Marca CE: 0050

B | BRAUN