

# Mepilex® Border Ag

## APÓSITO ANTIMICROBIANO DE ESPUMA ABSORBENTE CON TECNOLOGÍA SAFETAC


- Minimiza el dolor y el traumatismo en los cambios de apósito<sup>1,2,3</sup>
- Efecto antimicrobiano rápido y sostenido<sup>5</sup>
- Manejo del exudado muy efectivo
- Fijación segura y retirada atraumática

### Film posterior de poliuretano

- Permeable a gases.
- Impermeable a líquidos.
- Barrera efectiva contra virus y bacterias\*.

### Liberación rápida y sostenida de los iones plata

- Actividad antimicrobiana en 30 minutos y hasta 7 días.<sup>5</sup>

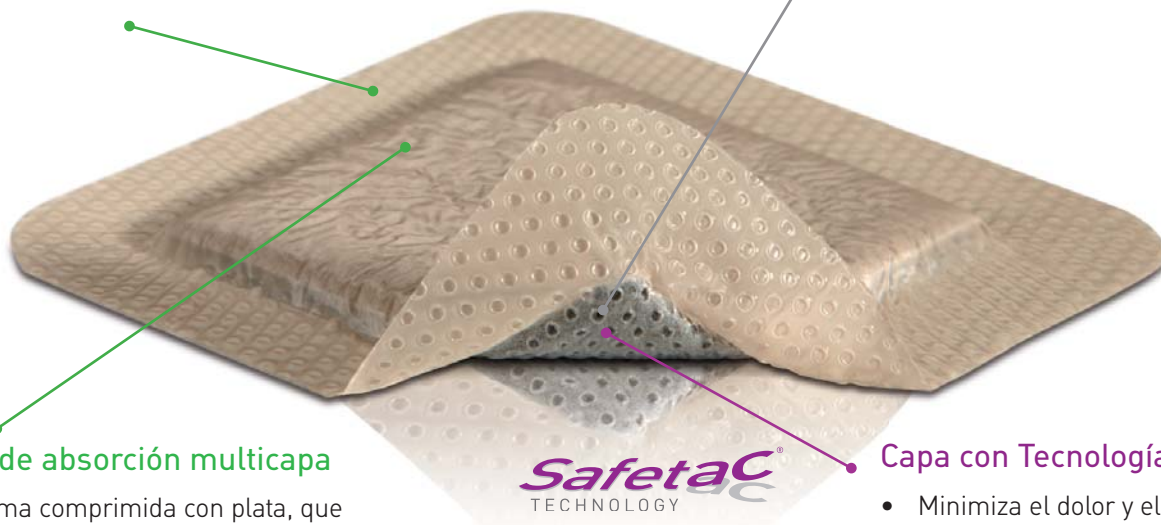

### Cuerpo de absorción multicapa

- Espuma comprimida con plata, que absorbe y distribuye el exudado.
- Capa de fibras superabsorbentes para una máxima retención del exudado:
  - fibras poliacrílicas
  - fibras de algodón
  - fibras de poliéster/ polietileno/polipropileno
- Capa de tela de tejido sin tejer.

### Capa con Tecnología Safetac®

- Minimiza el dolor y el traumatismo antes, durante y después de la retirada del apósito.<sup>1</sup>
- No se adhiere al lecho húmedo de la herida, sí a la piel seca.<sup>3</sup>
- Sella los márgenes de la herida y minimiza el riesgo de maceración.<sup>4</sup>


### Tecnología Safetac®

\*Microbios mayores de 25 nm


### Safetac® Menos trauma. Menos dolor.™

La Tecnología Safetac® es una tecnología exclusiva y patentada. Los apósitos con Tecnología Safetac® son atraumáticos incluso durante su retirada. Estos apósitos minimizan el traumatismo en la herida y la piel perilesional, lo que minimiza el dolor en el paciente. El riesgo de maceración se minimiza al sellar herméticamente los bordes de la herida.

Para más información visite [www.molnlycke.es](http://www.molnlycke.es)

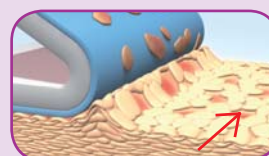


Desprendimiento de la piel con adhesivos convencionales

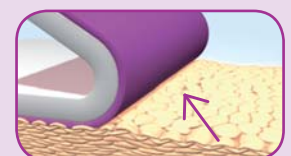


Sin desprendimiento de piel con la Tecnología Safetac

## Modo de utilización Mepilex® Border Ag

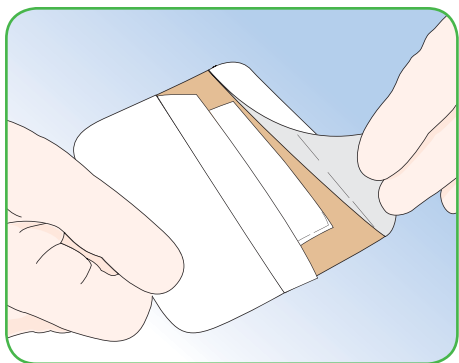

Limpiar la herida y retirar el papel protector

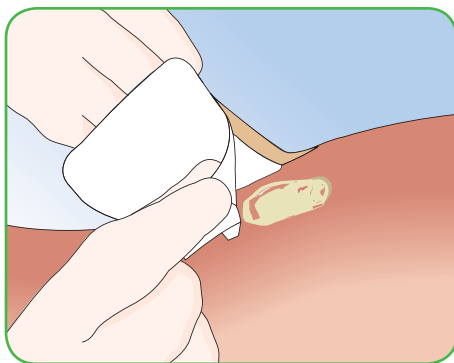

Aplicar la cara adherente sobre la herida.  
No estirar

## Cómo funciona Mepilex Border Ag

Mepilex® Border Ag es un apósito antimicrobiano todo en uno que absorbe y gestiona el exudado de forma efectiva y mantiene el ambiente húmedo de la herida. La capa con Tecnología Safetac® sella los bordes de la herida, minimizando así el riesgo de maceración. La capa con Tecnología Safetac® asegura que el apósito pueda cambiarse sin dañar la herida ni la piel perilesional.

Mepilex® Border Ag inactiva los agentes patógenos presentes en la herida en los primeros 30 minutos y tiene un efecto sostenido de hasta 7 días. Al reducir el número de microorganismos, Mepilex® Border Ag también reduce el olor de la herida infectada.

## Beneficios de Mepilex Border Ag


- Minimiza el dolor y el traumatismo en el cambio de apósito.
- Auto-adherente: no necesita una fijación secundaria.
- Impermeable.
- Puede usarse bajo vendaje compresivo.
- Muy cómodo para el paciente.
- Puede permanecer en su sitio durante varios días dependiendo de las condiciones de la herida.
- Se puede levantar y ajustar sin perder sus propiedades adherentes.
- Hipoalergénico.

## Indicaciones

Mepilex® Border Ag está diseñado para el tratamiento de heridas con un nivel de exudado medio-alto, en las que está indicado un ambiente de cura húmeda, una gestión eficaz del exudado y una acción antimicrobiana; tales como úlceras vasculares, úlceras por presión, lesiones malignas, quemaduras, heridas traumáticas y quirúrgicas.

## Precauciones

Para información más detallada ver el prospecto.

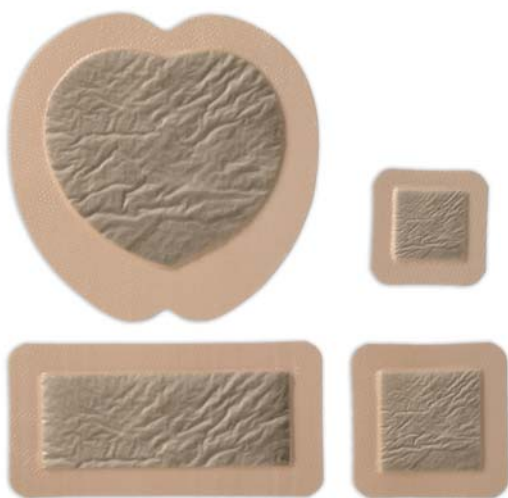

## PRESENTACIONES MEPILEX® BORDER AG

nº Ref.	Tamaño cm	Uds/env.	Uds/transp.
395200	7,5 x 7,5	5	70
395300	10 x 10	5	50
395400	15 x 15	5	50
395600	15 x 20	5	45
395800	10 x 20	5	35
395900	10 x 30	5	25
<b>Mepilex® Border Sacrum Ag</b>			
382000	18 x 18	5	40
382400	23 x 23	5	25

Sobres estériles