

Financiado

Mepilex® Talon

Todos los beneficios de Mepilex®,
ahora también para las lesiones de talón

- Se adapta al tamaño de cualquier talón
- Sella la lesión reduciendo el riesgo de maceración
- Minimiza el dolor y el trauma durante los cambios de apósito ^{1,2,3}

Presentación Mepilex® Heel

Nº Art.	Medida (cm.)	Medida (pulg.)	Unids./Caja	Unids. TRP
288100	13x20	5x8	5	25

Presentación Mepilex® Talon FINANCIADO

Nº Art.	Cód. Nac.	Medida (cm.)	Unids./Caja	Unids. TRP
288240	400105	13x21	3	15

Referencias:

1. Principles of best practice: Minimising pain and wound dressing-related procedures. A consensus document. London: MEP Ltd, 2004.
2. Dykes P. The Effect of Adhesive Dressings on the Stratum Corneum of Normal Skin [Data on file].
3. Dykes P. The link between the peel force of adhesive dressing and subjective discomfort in volunteer subjects. Journal of Wound Care, Vol 12, No 7, July 2003.



Polígono Industrial Arroyo de la Vega
Avda. Bruselas, 38 edif. B 1ª Plta
2808 Alcobendas - MADRID
Teléfono: 91 484 13 20

ES031450606

Adaptado a la medida de cualquier talón



Financiado

Mepilex® Talon

SafetaC
TECHNOLOGY


Prevención y cicatrización

Mepilex® Talon


¿Por qué elegir Mepilex® Talon?

● La Tecnología Safetac®:

- Evita el desprendimiento de las células epidérmicas durante el cambio de apósito².
- Minimiza el dolor y trauma en los cambios de apósito^{1,2,3}.
- Sella la lesión minimizando el riesgo de maceración.
- Se puede retirar sin perder su adherencia.

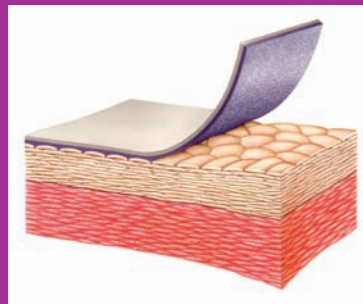

Tecnología Safetac®

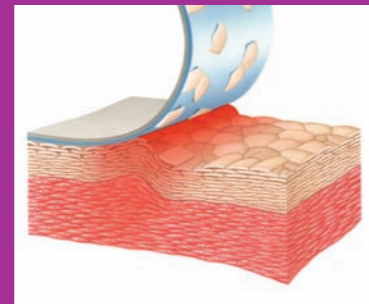

Adhesivo tradicional

Prevención y cicatrización

¿Cómo se aplica?



● Preparar el apósito

Retirar el film protector de mayor tamaño.



● Fijar al talón o maleolo

Fijar el apósito en la planta del pie o maleolo. Retirar el resto del film protector. Adaptar el apósito alrededor del tobillo juntando los bordes. Mepilex® Talon debe cubrir al menos 2 cm. de piel perilesional.



● Fijar el apósito

Fijar Mepilex® Talon de forma segura mediante un vendaje ligero o cualquier otro método de retención (ejemplo Tubifast®).



 **Mepilex® Talon**