

Askina® Barrier Film



ASKINA® Barrier Film

Descripción del producto

La película protectora **Askina® Barrier Film**, es un apósito líquido que forma una película transparente cuando se aplica en la piel, siendo muy permeable al oxígeno

Por carecer de alcohol en su composición, la película protectora **Askina® Barrier Film** no produce escozor ni molestias en la piel.

Composición

- Solvente no irritante de base de silicona:
 - Disiloxano (Hexametildisiloxano)
- Copolímero acrílico: formador de la película



Indicaciones

La película protectora **Askina® Barrier Film** puede aplicarse en piel intacta o dañada, actuando como barrera:

- Contra la irritación producida por fluidos corporales.
- Protección de la zona alrededor de las heridas (piel perilesional)
- Protección de la piel periestomal
- Protección de piel sensible y frágil.
- Protección frente a apósitos adhesivos.
- Protección de piel dañada
- Pequeños desgarros de la piel
- En puntos de fijación, para tubos de drenaje y catéteres externos.

Instrucciones de Utilización:

La película protectora **Askina® Barrier Film** es de aplicación muy sencilla y no requiere de conocimientos ni equipos especiales.

Una vez realizada la limpieza y secado de la piel, se procederá a la pulverización de **Askina® Barrier Film**, manteniendo la boquilla del pulverizador a 10-15 cm de la piel, presionando la boquilla y hasta conseguir una fina capa de película en la zona que lo necesite.

Si el producto se utiliza en una zona con pliegues cutáneos o de contacto piel con piel, alise los pliegues para aplicar la película y deje que ésta se seque antes de permitir el retorno de la piel a su posición normal.

El tiempo de re-aplicación dependerá de la frecuencia de la limpieza y del cambio de apósitos y otros dispositivos adhesivos, pudiéndose mantener su actividad y protección hasta 2-3 días posterior a su aplicación.

Ventajas:

- ✓ Protección duradera de hasta 72h.
- ✓ No produce dolor ni irritación (no contiene alcohol)
- ✓ Aplicable en piel intacta como lesionada
- ✓ No se absorbe
- ✓ Transparente
- ✓ Permeable al oxígeno y vapor húmedo
- ✓ Hipoalergénico
- ✓ No citotóxico

Condiciones de conservación

Conservar en lugar fresco y seco
Caducidad: 3 años.

Presentaciones

Venta Canal Farmacia:

- | | | |
|-------------------------------|--------------|----------------------|
| • Askina® Barrier Film 28 ml. | C/1 unidades | Código Braun 4002801 |
|-------------------------------|--------------|----------------------|

Venta Directa/Hospitalaria:

- | | | |
|-------------------------------|---------------|----------------------|
| • Askina® Barrier Film 28 ml. | C/12 unidades | Código Braun 4002812 |
|-------------------------------|---------------|----------------------|



Marca CE:0050

B|BRAUN